

**Банкетка
коридорна
зі спинкою і поручнями
МБС-3**

Інструкція із застосування



**ДСТУ ISO 9001:2018
ДСТУ ISO 13485:2018**



Шановний Клієнт,
дякуємо Вам за Ваш вибір. Щиро сподіваємося на те, що
використання нашої продукції зробить Вашу роботу комфортніше.
Колектив ТОВ «Омега Інвест Групп».

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ

Банкетка МБС-3 зі спинкою і поручнями призначена для відпочинку двох пацієнтів в очікуванні прийому лікаря в умовах лікарень та клінік.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Розміри:
 - висота 800 мм;
 - ширина 500 мм;
 - довжина 1400 мм;
- Маса, не більше 23 кг.
- Номінальне навантаження не більше 150 кг.

3. СКЛАД ВИРОБУ І КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Банкетка в зборі- 1 шт;
- Комплект кріплення (для розбірного виконання) - 1 компл.;
- Інструкція із застосування - 1 шт.

4. ПРИСТРІЙ І ПРИНЦИП РОБОТИ

Банкетка являє собою нерозбірну (або розбірну, в залежності від виконання) конструкцію, що складається з каркаса, до якого зверху укріплено ложе з ДСП, оббите вінілісшкірою без швів з м'якою підкладкою з пінополіуретану. Каркас банкетки виконаний з профільної труби і пофарбований білою порошковою фарбою, що має високу міцність і зносостійкість. У бічних частинах банкетки встановлені металеві ручки.

Всі матеріали, використані у виробництві Виробу, сертифіковані належним чином.

Конструкція Виробу може мати незначні відхилення від описаної, які не впливають на функціональність і надійність. Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію виробу.

УВАГА!

- **Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження.**
- **Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.**
- **Банкетка повинна бути встановлена на рівну стійку поверхню.**

5. ПІДГОТОВКА ВИРОБУ ДО РОБОТИ

- 5.1. Банкетка в залежності від виконання може бути виготовлена з суцільнозварним, або з розбірним каркасом. В залежності від виконання поставляється споживачеві упакованої в зібраному, або розібраному стані.
- 5.2. Розпакуйте банкетку, звільніть її від пакувального матеріалу.
- 5.3. Проведіть огляд деталей виробу на предмет можливих пошкоджень, викликаних транспортуванням.
- 5.4. Перевірте комплектність згідно п. 3.
- 5.5. У разі поставки банкетки в розбірному виконанні, зробіть її складання за допомогою вхідного в комплект кріплення.
- 5.6. Встановіть банкетку на рівну стійку горизонтальну поверхню.
- 5.7. Санітарна обробка банкетки проводиться шляхом протирання її поверхонь серветкою, змоченою 3% розчином перекису водню з додаванням 0,5% розчину миючого засобу або 1% розчином хлораміну.

6. СВДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Банкетка **МБС-3** відповідає ДСТУ ГОСТ 16371: 2016 і визнана придатною до експлуатації.

Дата випуску _____

№ партії _____

Підпис осіб, відповідальних за приймання _____

7. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

- 7.1. Виробник гарантує відповідність Виробу вимогам технічних умов при дотриманні споживачем умов експлуатації, транспортування і зберігання, встановлених в технічних умовах і зазначених у цьому паспорті.
- 7.2. Гарантійний термін експлуатації - 12 місяців з дня продажу, але не більше 18 місяців з дня виготовлення.
- 7.3. Протягом гарантійного терміну Виробник проводить ремонт Виробу після пред'явлення паспорта за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. Виборзька, 18.



ТОВ «Омега Інвест Груп»
Україна, 69032 м Запоріжжя, вул. Виборзька, 18
Тел: -096 809-84-28
e-mail: adam4444@ukr.net
[http: // omega.co.ua](http://omega.co.ua)