

**Крісло-каталка
КВК
для транспортування пацієнтів
(внутрішньокорпусне)
Інструкція із застосування**



**ДСТУ ISO 9001:2018
ДСТУ ISO 13485:2018**



Шановний Клієнт,
дякуємо Вам за Ваш вибір. Щиро сподіваємося на те, що
використання нашої продукції зробить Вашу роботу комфортніше.
Колектив ТОВ «Омега Інвест Груп».

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ

Крісло-каталка КВК призначена для внутрішньокорпусних переміщень пацієнта в сидячому положенні. Застосовується в умовах лікарень і клінік.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Розміри:
- - висота 940 мм;
- - ширина 560 мм;
- - довжина 990 мм;
- Розміри сидіння 450x460 мм;
- Маса, не більше 25 кг.
- Номінальне навантаження не більше 150 кг.

3. СКЛАД ВИРОБУ І КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Крісло-каталка КВК - 1 шт.
- Підніжки з відкидною складаною опорою стопи – 2 шт.
- Підставка-ремінь під гомілки – 1 шт. (Опція. Поставляється за окрему платню.)
- Інструкція із застосування - 1 шт.

4. ПРИСТРІЙ І ПРИНЦИП РОБОТИ

Каркас крісла суцільнозварний, виконаний із сталевих труб з нанесенням екологічно чистого полімерно-порошкового покриття, стійкого до багаторазової обробці дезінфікуючими розчинами, що застосовуються в медицині. У задній частині крісла є ручка для його переміщення.

Крісло встановлено на чотири колеса зі світлої гуми, що не залишає слідів. Забезпечені гальмами. Передні та задні колеса литі. Задні колеса діаметром 600 мм оснащені обручами для самостійного пересування Користувача та гальмами, що фіксують колеса від обертання. Конструкція КВК Optimum дозволяє встановити задні колеса в одному з трьох положень, що дозволяє вибрати найбільш зручний Користувачеві кут нахилу сидіння.

На каркасі укріплені м'які сидіння і спинка, обтягнуті вінілісшкірою без швів з м'якою прокладкою з поролону. На задній частині спинки виконана металева кишенька для супровідних документів (історія хвороби та ін.). Під сидінням встановлено металева сітка для розміщення речей пацієнта.

Підніжки зйомні, з відкидною складаною опорою стопи. Підніжки мають можливість повертатися та встановлюватися на потрібній висоті. Між подножників монтується знімний подголенний упор з м'якої поролоновою вставкою (опція). Крісло укомплектоване двома підлокітниками подовженої форми для підтримки передпліччя.

Крісло передбачає можливість переміщення людини без допомоги асистента.

Всі матеріали, використані у виробництві Виробу, сертифіковані належним чином

УВАГА!

- **Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією.**
- **Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження.**
- **Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.**
- **Забороняється користуватися Виріб з незатягнутими кріпильними елементами.**
- **Крісло призначене виключно для внутрішньокорпусних перевезень. Забороняється використовувати Виріб поза приміщеннями лікувальних установ.**
- **Крісло не призначене для самостійного використання пацієнтом. Перевезення пацієнта здійснюється персоналом.**
- **Слід з обережністю перевозити крісло через пороги, для чого використовуються спеціальні штовхачі на його нижній частині ззаду.**
- **Забороняється пересування крісла по сходах.**
- **Забороняється використання крісла для транспортування хворих в несвідомому стані. Допускається тільки із застосуванням спеціальних фіксуючих пристроїв.**
- **Використання гальм на задніх колесах при стоянці крісла є обов'язковою умовою його експлуатації. Забороняється стоянка крісла на поверхнях з ухилом.**

5. ПІДГОТОВКА ВИРОБУ ДО РОБОТИ

- 5.1. Крісло по конструкції нерозбірне, поставляється споживачеві упакованим в зібраному стані.
- 5.2. Розпакуйте крісло, звільніть його від пакувального матеріалу.
- 5.3. Проведіть огляд деталей виробу на предмет можливих пошкоджень, викликаних транспортуванням.
- 5.4. Перевірте комплектність згідно п. 3.
- 5.5. Встановіть підніжки з відкидною складаною опорою стопи. Перевірте їх функціонування.
- 5.6. Встановіть підставку-ремін під гомілки (за потреби).
- 5.7. Встановіть крісло на рівну стійку горизонтальну поверхню.
- 5.8. Перевірте функціонування гальм.
- 5.9. Санітарна обробка крісла проводиться шляхом протирання його поверхонь серветкою, змоченою 3% розчином перекису водню з додаванням 0,5% розчину миючого засобу або 1% розчином хлораміну.

6. СВДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Крісло-каталка **КВК** для транспортування пацієнтів (внутрішньокорпусне) відповідає ДСТУ ГОСТ 16371: 2016 і визнане придатним до експлуатації.

Дата випуску _____

№ партії _____

Підпис осіб, відповідальних за приймання _____

7. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

- 7.1. Виробник гарантує відповідність Виробу вимогам технічних умов при дотриманні споживачем умов експлуатації, транспортування і зберігання, встановлених в технічних умовах і зазначених у цьому паспорті.
- 7.2. Гарантійний термін експлуатації - 12 місяців з дня продажу, але не більше 18 місяців з дня виготовлення.
- 7.3. Протягом гарантійного терміну Виробник проводить ремонт Виробу після пред'явлення паспорта за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. Виборзька, 18.



ТОВ «Омега Інвест Груп»
Україна, 69032 м Запоріжжя, вул. Виборзька, 18
Тел: -096 809-84-28
e-mail: adam4444@ukr.net
[http: // omega.co.ua](http://omega.co.ua)