

Крісло-каталка
КВК
для транспортування пацієнтів

Інструкція із застосування



ДСТУ ISO 9001:2018
ДСТУ ISO 13485:2018



Шановний Клієнт,
дякуємо Вам за Ваш вибір. Щиро сподіваємося на те, що
використання нашої продукції зробить Вашу роботу комфортніше.
Колектив ТОВ «Омега Інвест Груп».

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ

Крісло-каталка КВК призначене для підйому та транспортування пацієнта. Для внутрішньокорпусних переміщень пацієнта в сидячому положенні. Застосовується в умовах лікарень і клінік, на вулиці та вдома.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Довжина крісла мм: 740;
- Ширина крісла мм: 530;
- Висота ручок мм: 980-1180;
- Висота сидіння від підлоги мм: 370-570;
- Каркас: сортова сталь;
- Матеріал спинки: поролон;
- Матеріал сидіння: поролон;
- Максимальне навантаження: 100 кг;
- Вага нетто: 15 кг.

3. СКЛАД ВИРОБУ І КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Крісло-каталка КВК - 1 шт.
- Інструкція із застосування - 1 шт.

4. ПРИСТРІЙ І ПРИНЦИП РОБОТИ

Конструктивно крісло виконане із двох половин, які мають можливість по черзі бути підведені під пацієнта, а потім зафіксовані. Сидіння змонтоване на цільнозварній рамі, встановленій на безшумні колеса, два з яких забезпечені гальмами. Сидіння крісла має можливість встановлення на потрібній висоті з фіксацією в потрібному положенні. Рама виготовлена із сталі з полімерним покриттям. Покриття стійке до санітарно-дезінфекційної обробки. Сидіння забезпечене м'якими накладками під спину та подушкою.

Пацієнт повинен сидіти прямо, коли рухомі частини крісла розгорнуті перед ним. Підніміть ноги пацієнта, щоб наступити на педалі. Переконайтеся, що його гальма заблоковані, доки пацієнт не сяде на крісло. Коли пацієнт нахилиється вліво та вправо, поверніть відповідний бік крісла, щоб у нього помістився пацієнт. Після того, як пацієнт сяде, крісло з'єднайте за спиною та зафіксуйте застібку. Потім заблокуйте замок безпеки. Розблокуйте гальма, коли пацієнт сидить із заблокованими замком. Візьміться за передні ручки, щоб перемістити пацієнта. Розблокуйте замок і розкрийте крісло після того, як пацієнт буде переміщений у необхідне місце.

Крісло передбачає можливість переміщення людини з допомоги асистента.

Всі матеріали, використані у виробництві Виробу, сертифіковані належним чином.

УВАГА!

- **Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією.**
- **Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження.**
- **Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.**
- **Після складання виробу необхідно переконатися в надійності затягування кріплення.**
- **Забороняється користуватися Виріб з незатягнутими кріпильними елементами.**
- **Слід з обережністю перевозити крісло через пороги, для чого використовуються спеціальні штовхачі на його нижній частині ззаду.**
- **Забороняється пересування крісла по сходинках.**
- **У випадку використання виробу різними пацієнтами рекомендується систематично і ретельно мити та дезінфікувати його, щоб уникнути інфекцій**
- **Забороняється використання крісла для транспортування хворих в несвідомому стані. Допускається тільки із застосуванням спеціальних фіксуючих пристроїв.**
- **Використання гальм на задніх колесах при стоянці крісла є обов'язковою умовою його експлуатації. Забороняється стоянка крісла на поверхнях з ухилом.**

5. ПІДГОТОВКА ВИРОБУ ДО РОБОТИ

- 5.1. Крісло по конструкції розбірне, поставляється споживачеві упакованомк стані.
- 5.2. Розпакуйте, звільніть його від пакувального матеріалу.
- 5.3. Проведіть огляд деталей виробу на предмет можливих пошкоджень, викликаних транспортуванням.
- 5.4. Складіть за схемою.
- 5.5. Встановіть крісло на рівну стійку горизонтальну поверхню.
- 5.6. Перевірте функціонування гальм.
- 5.7. Санітарная обробка крісла проводиться шляхом протирання його поверхонь серветкою, змоченою 3% розчином перекису водню з додаванням 0,5% розчину миючого засобу або 1% розчином хлораміну.

6. СВДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Крісло-каталка **КВК** для транспортування пацієнтів відповідає ДСТУ ГОСТ 16371: 2016 і визнане придатним до експлуатації.

Дата випуску _____

№ партії _____

Підпис осіб, відповідальних за приймання _____

7. ГАРАНТІЙ ВИРОБНИКА

- 7.1. Виробник гарантує відповідність Виробу вимогам технічних умов при дотриманні споживачем умов експлуатації, транспортування і зберігання, встановлених в технічних умовах і зазначених у цьому паспорті.
- 7.2. Гарантійний термін експлуатації - 12 місяців з дня продажу, але не більше 18 місяців з дня виготовлення.
- 7.3. Протягом гарантійного терміну Виробник проводить ремонт Виробу після пред'явлення паспорта за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. Виборзька, 18.



ТОВ «Омега Інвест Груп»
Україна, 69032 м Запоріжжя, вул. Виборзька, 18
Тел: -096 809-84-28
e-mail: adam4444@ukr.net
[http: // omega.co.ua](http://omega.co.ua)